

コンタクトフィルムのケア

毎日のコンタクトフィルムのケアは、より快適なコンタクトライフのための大切なお約束です。

コンタクトフィルムのケアとは、洗浄・すすぎ・保存・消毒など一連のお手入れのことで、

コンタクトフィルムをより快適に装用する上で欠かすことはできません。

目の中に入れるコンタクトフィルムには、涙中のたんぱく質や脂肪などの汚れが付着したり、取り出すときなどにふれる手指の汚れが付着したりします。これらの汚れが蓄積するとカビや雑菌が繁殖し、フィルムの劣化を早めたり、眼のトラブルを引き起こしたりする恐れもあります。

大切なひとみのために、毎日のケアはとても重要なのです。



●●●コンタクトフィルムを取りあつかう前には必ず手を洗ってね●●●

STEP 1：洗う




フィルムを手のひらにのせ、ケア用品の液体を2・3滴落とし、指のはらでやさしくこすり洗います。裏面も同様にしてください。

STEP 2：すすぐ



表面の汚れをケア用品ですすいで取り除きます。

STEP 3：消毒+保存

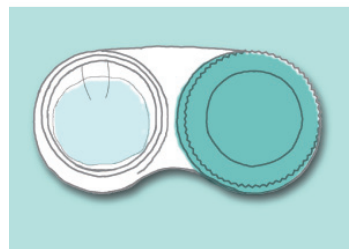

ケア用品に付属のレンズケースにケア用品をそそぎ、コンタクトフィルムを入れてください。一晩程つけ置きする事で消毒されます。

使用上の注意

- ①寝る前には必ずコンタクトフィルムをはずしてケアを行なってください。
- ②コンタクトフィルムをはずした後、使わない日も含めてソフトコンタクト用のケア用品で毎日ケアして汚れなどを取り除いてください。ケア用品は化学消毒システム（コールドケア用品）を使用してください。保存容器が付属した製品が便利です。薬局などでお求めください。
- ③コンタクトフィルムの保存には精製水またはソフトコンタクトレンズ専用の保存液を使用して、水道水は使用しないでください。水道水にはアカントアメーバやその他の雑菌がいることがあります。また、ケア用品に付属の新しい保存容器に保存してください。古い容器は感染の原因となる場合があります。
- ④本説明書とケア用品添付文書の内容に差異がある場合には、ケア用品添付文書の内容に従ってください。

～商品についてのお問合せはこちらへ～

JPS 株式会社 コンタクト事業部：03-5992-0760